



Prolapsikuutio

– ominaisuudet ja käyttöohje

1/2018

Ominaisuudet


- Eriasteisiin vaginan ja kohdun laskeumiin sekä virtsanpidätyksen häiriöihin
- Sopii myös tilanteissa, joissa prolapsirengasta ei voida käyttää
- Materiaali silikonista
- 6 kokoa: 25 mm - 45 mm (koot 0-5)
- Käyttöikä 1 v.

Käyttö

- Aloitetaan pienellä koolla, yleensä koko 2. Liian pieni putoaa helposti.
- Prolapsikuutio asetetaan aamuisin ja poistetaan iltaisin. Näin ehkäistään vierasesineen aiheuttama ärsytys kuten lisääntynyt valkovuoto, verenvuoto tai haavaumat.
- HUOM. Tarvittaessa prolapsikuutiota voidaan pitää paikallaan myös useampi päivä mikäli prolapsikuutio ei aiheuta limakalvoärsytystä

Paikoilleen asettaminen

- Kostuta kuutio vedellä
- Nosta jalka jakkaralle tai sängyn reunalle
- Purista kuutio kasaan kahden sormen väliin. Aseta kuutio puristettuna mahdollisimman ylös emättimeen.

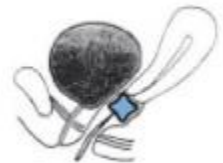

Poistaminen

- Purista kuutiota tai vie sormi kuution ja emättimen seinämän väliin, jolloin vakuumi vapautuu ja vasta tämän jälkeen vedä kuutio varovasti ulos.
- HUOM. Narusta ei saa vetää, ennen kuin vakuumi on vapautettu!



Puhdistaminen käytön jälkeen

- Pestään juoksevilla vedellä
- Keittäminen tai sterilointi saattaa vaurioittaa materiaalia

Estrogeenin käyttö

- Kuution voi tarvittaessa sivellä estrogeenillä ennen kuin sen asettaa paikalleen. Estrogeenin voi myös laittaa illalla kuution poiston jälkeen.

kun hoitotulokset ratkaisevat

Steripolar

Puh. 09 417 606 00

| www.steripolar.fi

| ISO 9001:2015 ISO 14001:2015