



LordoLoc®

Hyvä asiakkaamme,

kiitos päätöksestäsi ostaa Bauerfeind-tuote. Teemme joka päivä työtä hoitotuotteidemme tehokkuuden parantamiseksi entisestään, sillä terveytesi on meille tärkeää. Lue ja noudata huolellisesti näitä käyttöohjeita. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä hoitavaan lääkäriisi tai tuotteen jälleenmyyjään.

Käyttötarkoitus

LordoLoc on terveydenhuollon tarvike. Se on lannerankaa stabiloiva ja siihen kohdistuvaa kuormitusta vähentävä ortoosi¹, joka on varustettu kiristysshinnoilla.

Käyttöaiheet

- Kivut lannerangan alueella (akuutit ja krooniset)
- Selkärangan lihasten keskivaikea rappeuma/toiminnanvajaus

Haittavaikutukset

⚠️ Tärkeää tietoa

- LordoLoc on tuote, jota on käytettävä lääkärin ohjeiden mukaisesti. LordoLocia saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa esitetyllä tavalla ja käyttöohjeessa mainittuihin käyttötarkoituksiin.
- Tuotetta tulisi käyttää t-paidin tai aluspaidan päällä.
- Ammattihenkilön² on sovitettava LordoLoc-ortoosi potilaalle asianmukaisesti ja yksilöllisesti. Ortoosin toimivuus ja käyttömukavuus voidaan taata vain siten.
- Tuotteen virheellinen käyttö kumooa siihen liittyvän vastuun.
- Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi heikentää tuotteen toimivuutta, jolloin valmistaja ei ota tuotteeseen liittyvää vastuuta.
- Yhteiskäytöstä muiden tuotteiden kanssa on neuvoteltava ennen käyttöä lääkärin kanssa.
- Älä päästä tuotetta kosketuksiin rasvoja ja happoja sisältävien aineiden tai voiteiden ja kosteusemulsoidien kanssa.
- Noudata pakkauksen määräystenmukaista kierrättämistä varten sen myyntipisteen ohjeita, josta hankit tämän tuotteen.
- Ota reklamaatiotapauksessa yhteyttä ainoastaan jälleenmyyjään. Huomaa, että vain puhdistettua tuotetta voidaan korjata.
- Koko elimistöön kohdistuvia haittavaikutuksia ei ole tähän mennessä raportoitu. Edellytyksenä on asianmukainen käyttö / sovitus. Kaikki kehoon kiinnitettävät apuvälineet – tuet ja ortoosit – voivat liikaa kiristettyinä aiheuttaa paikallista puristusta, tai harvoissa tapauksissa myös puristaa alla olevia verisuonia tai hermoja.
- Jos tunnet epämiellyttävää painetta, tarkista apuvälineen istuvuus ja kysy asiasta sekä muista yleisistä käyttöohjeista ammattihenkilöstöltä.
- Huomio: Jos hihnoja sekä kiristys- ja kiinnitysmekanismeja hölennetään tai tuote riisutaan tai liikerajoitusten säätöjä muutetaan, hoidettavaa ruumiinosaa ei tueta eikä suojata riittävästi. Vältä erityisesti tässä tapauksessa ruumiinosan kuormittamista.
- Jos huomaat tuotteen käytön yhteydessä kielteisiä muutoksia tai vaivojen pahenemista, keskeytä tuotteen käyttö ja ota viipymättä yhteys hoitavaan lääkäriin.

Käyttörajoitukset

Herkistymisestä aiheutuvia terveydellisiä haittavaikutuksia ei ole tähän mennessä raportoitu. Seuraavissa tilanteissa tällaisen apuvälineen soveltamisesta ja käytöstä on neuvoteltava lääkärin kanssa:

- Ihosairaudet / -vammat alueella, jolla tukea käytetään, erityisesti, jos kyseinen alue on tulehtunut. Samoin, jos kyseisellä alueella on koholla olevia arpia, turvotusta, punoitusta tai kuumotusta.
- Heikentynyt ihotunto.
- Sydämen ja keuhkojen suorituskyvyn huomattava heikentyminen (vaarana verenpaineen kohoaminen, jos tätä ortoosia käytetään raskaan ruumiillisen rasituksen aikana).

Käyttöohjeet

Ohjeet ammattihenkilöstölle²

Tukia voidaan tarvittaessa säätää yksilöllisesti.

LordoLoc -tuen sovittaminen

- Aseta ortoosi keskivartalon ympärille siten, että tuet sijoittuvat selän keskelle. Kiristysshihnät osoittavat ylöspäin **1**.
- Työnnä sormet oikean- ja vasemmanpuolisissa kiinnitysosissa oleviin käsilenkkeihin ja vedä ortoosia tasaisesti eteenpäin **2**.
- Paina vasen tarrakiinnitinosa vatsaa vasten ja vedä oikeaa tarrakiinnitinosaa niin pitkälle, että saat tarran kiinnitettyä **3**.
- Kiinnittäessä tarraa vedä sormet ensin vasemmasta käsilenkistä ja seuraavaksi oikeasta käsilenkistä **4**.

- Vedä ylähihnan molempia päitä eteenpäin ja säädä samalla kompressiota tukevan kiristykseen määrä yksilöllisesti potilaan mukaan **5**. Kiinnitä sitten ylähihnan päät tarrakiinnitinsosaan **6**. Kiinnitä tällöin huomiota siihen, että tarrapinta kiinnittyy kokonaan tuotteen pintaan. Näin vältetään tarran kosketus vaatteisiin ja ihoon.

Hoito-ohje

Käytä tuen pesemiseen hienopesuainetta ja pesupussia. Tarrakiinnitysten pitkäaikaisen toimivuuden takaamiseksi ja vaurioiden välttämiseksi suosittelemme sulkemaan tarrakiinnitykset ennen pesua. Älä altista tuotetta suoralle kuumuudelle tai kylmyydelle. Noudata myös tuotteen yläreunaan ommellussa tuote-etiketissä olevia hoito-ohjeita. Säännöllinen hoito takaa tuotteen optimaalisen vaikutuksen.

Käyttöalue

Käyttöaiheiden mukainen (lanneranka). Katso Käyttötarkoitus-kohta.

Huolto-ohje

Jos tuotetta käsitellään ja hoidetaan asianmukaisesti, sitä ei tarvitse huoltaa.

Kokoamis- ja asennusohje

LordoLoc-ortoosi toimitetaan käyttövalmiina.

Tekniset tiedot, parametrit

LordoLoc on kiristysshinnoilla varustettua neulosta. Selän alueella ortoosin vahvikkeena on korsettitukia. Ympärysmittaa voi suurentaa kiinnitysjatkeen avulla.

Tuotteen uudelleenkäyttö

Tuote on tarkoitettu vain yhdelle potilaalle.

Takuu

Tuotteen hankintamaassa voimassa olevaa lainsäädäntöä sovelletaan. Soveltuvin osin myyjän ja ostajan väliseen suhteeseen sovelletaan maakohtaisia takuusäännöksiä. Jos epäilet takuutapausta, ota ensimmäiseksi yhteyttä suoraan tuotteen myyjään. Älä tee tuotteeseen minkäänlaisia muutoksia itse. Varsinkaan ammattihenkilöstön² tekemiä yksilöllisiä mukautuksia ei saa muuttaa. Noudata antamiamme käyttö- ja hoito-ohjeita. Ne perustuvat monivuotiseen kokemukseemme ja varmistavat lääkinnällisten tuotteidemme toimivuuden pitkäksi aikaa. Vain ihanteellisesti toimivista apuvälineistä on käyttäjälleen hyötyä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi myös rajoittaa takuun voimassaoloa.

Tuotevastuu

Älä tee itsediagnoosia tai itsehoitoa, ellet kuulu ammattihenkilöstöön². Ennen kuin käytät lääkinnällistä laitettasi ensimmäistä kertaa, kysy neuvoa lääkäriltä tai ammattihenkilöstöltä², sillä se on ainoa tapa arvioida tuotteemme vaikutusta kehoosi ja selvittää mahdollisia ruumiinrakenteestasi aiheutuvia käyttöön liittyviä riskejä. Noudata ammattihenkilöstön² neuvoja ja kaikkia tämän asiakirjan tai siitä verkossa kokonaisuena tai osittaisena julkaistun version ohjeita (mukaan lukien tekstit, kuvat, grafiikka jne.). Jos jokin asia jää epäselväksi ammattihenkilöstön² konsultoinnin jälkeen, ota yhteyttä lääkäriisi, jakelijaasi tai suoraan meihin.

Ilmoitusvelvollisuus

Alueellisen lainsäädännön nojalla kaikista tämän terveydenhuollon tarvikkeen käyttöön liittyvistä vakavista haittatapahtumista on ilmoitettava sekä valmistajalle että toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Valmistajan yhteystiedot ovat tämän esitteen takakannessa.

Hävittäminen

Hävitä tuote käytön päätyttyä paikallisten määräysten mukaisesti.

Materiaalikoostumus

Ruostumatonta terästä, Polyamidi (PA), Polyuretaani (PUR), Puuvilla (CO), Polyeteeni (PE), Elastaani (EL), Viskoosi (CV), Polyesteri (PES), Termoplastinen polyuretaani (TPU)


MD – Medical Device (Lääkinnällinen laite)

UDI – Datamatriisin tunnistus UDI:na

Versio: 2024-09

¹ Ortoosi = ortopedinen apuväline, joka stabiloii, tukee tai immobilisoi raajoja tai vartaloa sekä ohjaa tai korjaa niiden liikkeitä ja asentoa

² Ammattihenkilöstöön lukeutuvat henkilöt, jotka voimassa olevien kansallisten tai institutionaalisten määräysten ja muiden sääntöjen mukaisesti ovat valtuutettuja sovittamaan ortopedisiä apuvälineitä ja opastamaan niiden käyttöön. Valmistajana ehdoton suosituksemme on, että tällaisella henkilöllä on teknisen ortopedian koulutus tai vastaava osaaminen sekä käytettävissään teknisen ortopedian varustus.

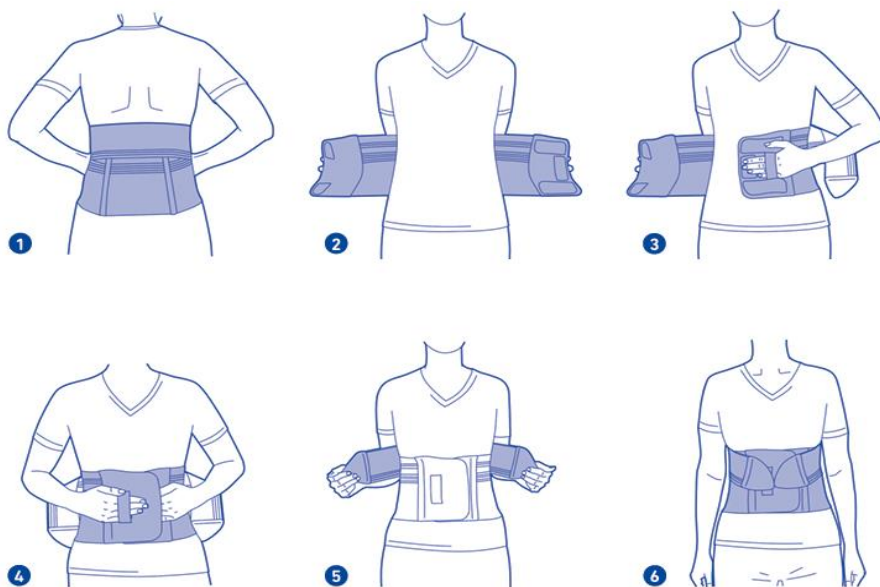

30°C
86°F

