

Yleistä tietoa

Hyvä asiakas

Tämä käyttöohje sisältää lääketieteellisen laitteen kuvauksen ja tärkeitä ohjeita varmista tuotteen oikea ja turvallinen käyttö. On tärkeää lukea tämä ennen käyttöä huolellisesti. On erityisen tärkeää lukea turvallisuusvaatimukset ja noudattaa niitä. Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden ilman erillistä ilmoitusta muuttaa tuotteita ja toimintoja.

Laitteen tarkoitettu käyttö

Tämä Mobilex-tuote on lääketieteellinen laite, joka on tarkoitettu käytettäväksi vain kävelyä avustavana henkilöille, jotka eivät pysty seisomaan, kävelemään itsenäisesti ja jotka vaativat ylimääräistä vakaata tukea kävelyn aikana. Tuote antaa tällaisille henkilöille mahdollisuuden suorittaa suuren osan säännöllisestä, päivittäisestä toiminnastaan ilman avustajan apua.

Muu käyttö on kielletty.

Merkinnät: laite on tarkoitettu käytettäväksi ihmisten kävely- ja seisonatukena henkilöille, joilla on jokin sairaus tai vamma, joka vaikeuttaa seisomista ja/tai liikkumista omin avuin. Oikean tyyppisen laitteen valinta riippuu potilaan tilasta ja tulisi aina ottaa ammattimaisen lääkärin tai fysioterapeutin toimesta


Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Turvallisuusvaatimukset

- Laitetta saa käyttää vain sisätiloissa
 - Jos havaitaan vikoja tai virheitä, ota heti yhteys jälleenmyyjään.
 - Noudata tuotteen etiketissä olevia tietoja.
 - Käytä tuotetta vain kuvattuun tarkoitukseen.
 - Vältä rakentavia muutoksia laitteeseen, ellei sinulla ole valmistajan kirjallinen hyväksyntä tällaisille muutoksille.
 - Laitteen mahdollisten säätöjen aikana käyttäjän on kiinnitettävä varovaisuutta, etteivät sormet tai muut ruumiinosat puristu kahden liikkuvan osan väliin.
 - Kaikkien pyörien TÄYTYY olla kosketuksissa lattiaan käytön aikana. Tämä varmistaa että se on oikein tasapainotettu ja näin vältetään onnettomuuksia.
 - Kun käytät rollaattoria seisonatukena, lukitse käsijarrut.
 - Laitetta ei saa ladata enempää kuin kohdassa 6 kuvattu enimmäiskuormitusarvo
- Tekniset tiedot ja tuotteen etiketissä.
- Korin kuormarajoitus on 5 kg.

Tuotteen Kuvaus

Mobilex- "Jaguar" rollaattorissa on jauhemaalattu alumiinirunko. Siinä on herkkä ohjattavuus, hyvä vakaus ja siinä on korkeussäädettävät työntökahvat käyttäjän mukaan. Rollaattori sisältää tavaroiden kuljettamista varten korin ja tarjottimen.

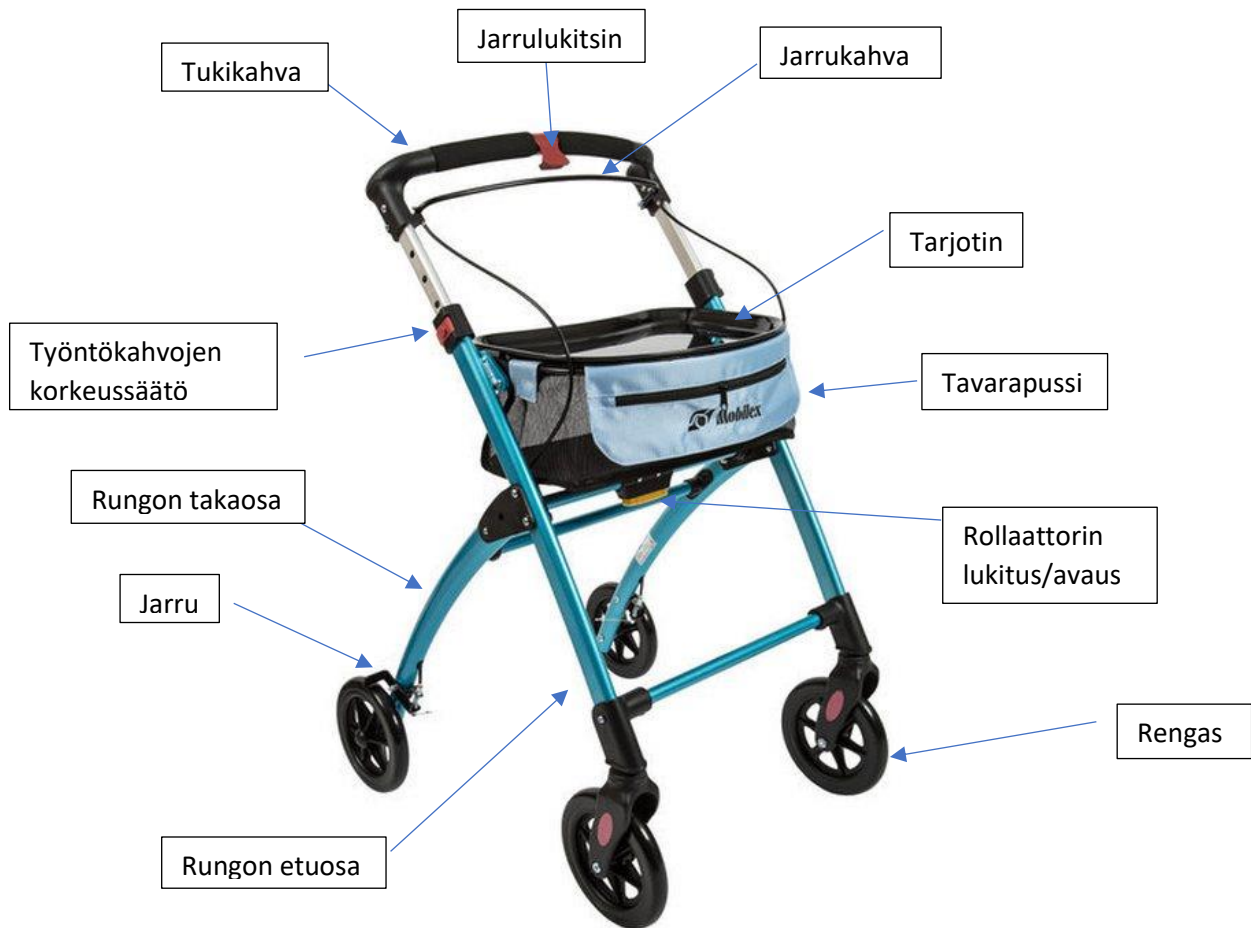

Kokoonpanon kuvaus

- Ota rollaattori ulos laatikosta ja aseta se pystyssä lattialle.
- Vertaa yllä olevaan luetteloon, jos mitään puuttuu.
- Pidä yhdellä kädellä kiinni tukikahvasta ja toisella kädellä tartu takaosaan kehysjalat ja vedä sitä varovasti taaksepäin.
- Paina kahvaa varovasti alas, kunnes kehys on täysin auki.
- Rollaattori on täysin auki, kun kuulet selkeän napsautuksen.
- Aseta rollaattori tasaiselle pinnalle. Kaikkien pyörien tulee koskettaa alustaa.
- Säädä molemmat työntökahvat samaan korkeuteen
- Varmista, että työntökahvojen punaiset napsautuspainikkeet ovat kunnolla lukittuina, jotta rollaattori on vakaa ja osat eivät voi liikkua paikoiltaan käytössä.
- Testaa aina varmistaaksesi, että runko ja lisälaitteet ovat kunnolla ja turvallisesti lukittuina ENNEN käyttöä
- Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin

Työntökahvojen säätö

- Säädä työntökahvojen korkeus siten, että kun käyttäjän käsivarsi on ojennettuna alas kädensija on ranteen korkeudessa. Säädä korkeus vapauttamalla punaiset napsautuspainikkeet jotka sijaitsevat yläkehysten putkissa. Säädä sitten kahva haluamaasi korkeuteen, sulje napsautuspainike jälleen turvallisesti. Toista vaiheet toisen kahvan kohdalla, niin että molemmat ovat samalla korkeudella.

- Varmista, että kaikki säädöt ovat kiinnitettyinä ja pyörät ja liikkuvat osat ovat hyvässä kunnossa ennen käyttöä.

Jarrutus

- Vedä jarrukahvasta ylöspäin niin jarrut lukittuvat
- Seisontajarru voidaan kytkeä päälle pitämällä jarrukahvaa yläasennossa ja laittamalla jarrulukitsin jarrukahvan alle. Seisontajarru pitää kytkeä pois päältä ennen liikkeelle lähtöä.

Kokoontaitto

- Poista tarjotin rollaattorista
- Paina rungon taittopalkin avauspainiketta ja työnnä kehyksen takaosaa kevyesti kohti etujalkaa kääntääksesi rollaattorin kokoon.

Puhdistus ja huolto

Puhdista laite säännöllisesti ja pidä se puhtaana. Normaali lika metalli- ja muoviosissa poistetaan märällä liinalla ja tavallisilla, syövyttämättömillä, miedolla pesuaineilla.

Tarkista tietyt tuotetiedot ja käytä vain kaupallisia puhdistusaineita, jotka sopivat puhdistukseen ja desinfiointiin. (Älä käytä liuottimia, kovia hioma-aineita tai valkaisuainetta perustuvat puhdistusaineet). Pyyhi osat kuivaksi pehmeällä liinalla.

Voitele pyörien akselit ajoittain 3-1 öljyllä tai jos pyörät alkavat pitää ääntä. Tarkista kaikkien ruuvien kireys, kiristä tarvittaessa. Korvaa rikkoutuneet, vaurioituneet tai kuluneet osat välittömästi.

Vakaasta rakenteesta ja kestävien materiaalien käytöstä huolimatta, on suositeltavaa tarkastaa tuote säännöllisin väliajoin.