



Actimo Wheelchair

User Instructions




Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen Actimo-pyörätuolin kokoamista, säätämistä tai käyttöä. Säilytä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten. Käyttöohje sisältää kaikki Actimo-pyörätuolin säätämiseen ja käyttöön tarvittavat tiedot. Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Käyttötarkoitus

Actimo pyörätuoli on suunniteltu sisä- ja ulkokäyttöön ja se on tarkoitettu itsenäiseen liikkumiseen tai avustettuun henkilön kuljetukseen. Sopii henkilöille, jotka eivät voi kävellä esimerkiksi halvaantumisen tai fyysisen heikkouden takia. Avustettuun kuljetukseen avustajalle on työntökahvat.

Ohjeet / kokoaminen

1. Poista kaikki yksittäiset osat pahvilaatikosta ja tarkista sisältö ja pakkaus vaurioilta.
2. Pyörätuoli toimitetaan esiasennettuna. Pidä pyörätuolista lujasti kiinni kahvoista ja taita se hitaasti erilleen.
3. Taita pyörätuoli painamalla molemmilla käsillä istuinalueen sivuilta, kunnes se lukittuu. Varo jättämästä sormia rungon väliin.
4. Ripusta jalkatuet pyörätuolin oikealla ja vasemmalla puolella olevaan runkoon, ja käännä ne sisäänpäin, jolloin ne napsahtavat kuuluvasti paikalleen. Taita jalkaläpät alas ja säädä jalkaläppien korkeus: Löysää lukitusmutterit molemmilta puolilta ja aseta jalkaläpät halutulle korkeudelle ennen lukitusmutterien kiristämistä uudelleen. Jalkatuet saadaan irrotettua painamalla lukitusmekanismia, kääntämällä jalkatuet ulospäin ja nostamalla jalkatuet pois. Jalkatuet ovat oikealla korkeudella silloin, kun pyörätuolissa istuvan henkilön reidet ovat vaakasuorassa asennossa.

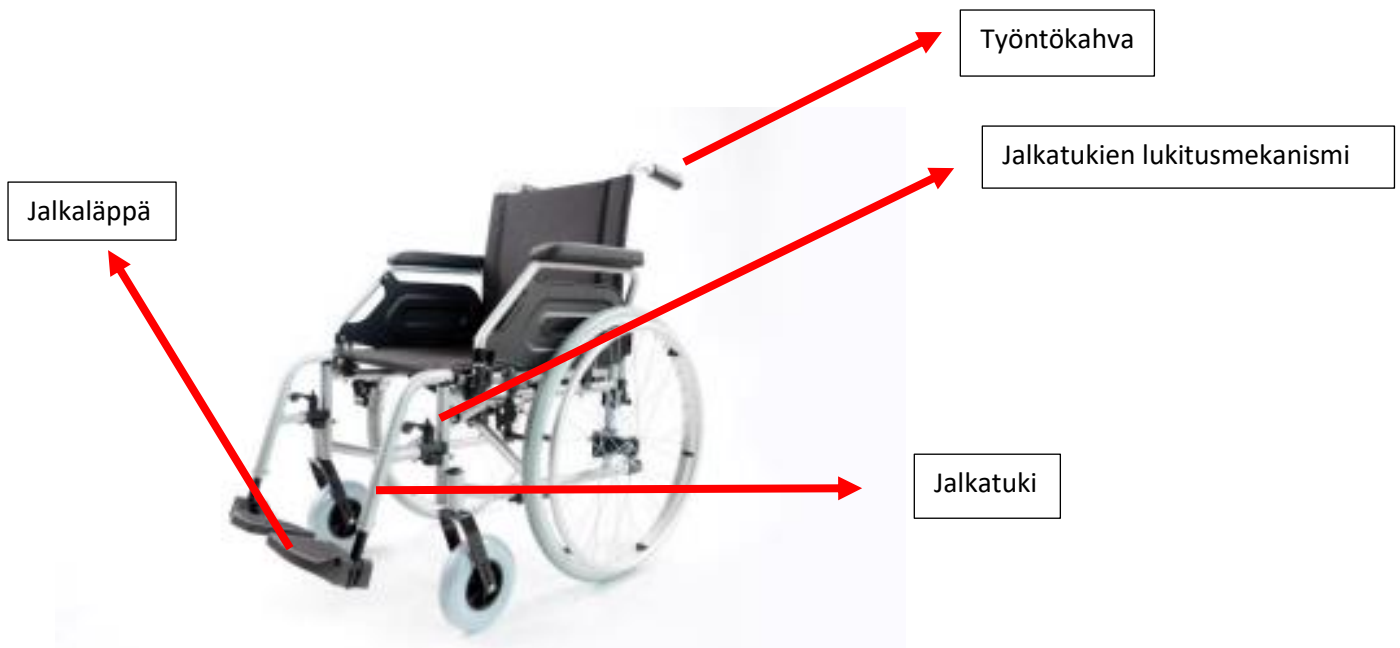

5. Istuimen korkeussäätö: Irrota etupyörät ja valitse korkeus. Etupyörän haarukoissa on reiät eri korkeuksille. Kiinnitä etupyörät ja varmista, että ruuvit ovat tiukalla. Irrota yksi kuljetuspyörä kerrallaan. Säädä pyörän korkeus samaksi kuin etupyörissä ja varmista, että ruuvit ovat kireällä. Aseta pyörä takaisin ja varmista että pyörä on lukittunut. Tarkista, että korkeussäädöt ovat samat kaikilla pyörillä, ennen pyörätuolin käyttöönottoa!



6. Käsinojen siirtäminen: Paina kädensijan lukko alas ja taita käsinoja selkätuen taakse. Kiinnitä käsinoja takaisin paikoilleen taittamalla käsinoja alas, kunnes kuulet selvän napsahduksen.



7. Seisontajarrujen käyttö: Seisontajarrun avulla pyörätuoli pysyy paikoillaan. Jarru lukitaan työntämällä jarrukampi eteenpäin. Jarru avataan vetämällä jarrukampi taaksepäin. Pysähdyksissä ja siirtotilanteissa varmista, että jarrut ovat lukittu molemmin puolin.



Jarrukampi

8. Takapyörien irrottaminen: Irrota pyörä painamalla akselin keskellä olevasta napista ja vedä pyörä ulos. Aseta pyörä takaisin painamalla nappi pohjaan ja työnnä pyörä paikoilleen. Varmista, että pyörä lukittuu.



Takapyörän akseli

9. Kallistusapuväline pyörätuolin takana tekee avustajalle helpommaksi pyörätuolin kallistamisen ja helpottaa näin esteiden ylipääsyä. Aseta jalkasi vivulle ja pidä tukevasti kiinni työntökahvoista. Paina jalkavipua alaspäin ja etupyörät nousevat. HUOM! Kaatumisvaara!



10. Kuljettamista varten pyörätuoli on hyvä taittaa kokoon. Se vie vähemmän tilaa ja mahtuu näin pienempäänkin kulkuneuvoon. Kokoonlaittaminen on helppoa. Käännä jalkatukien alustat pystysuoraan asentoon tai poista jalkatuet kokonaan. Ota sormiote molemmin puolin istuimen keskilinjasta ja nosta ylöspäin, kunnes pyörätuoli on täysin kasassa. Takapyörät saadaan irrotettua kohdan 8. mukaisesti.

Tekniset tiedot

- Leveys: Istuimen leveys + 21 cm
- Kokonaissyvyys: 98 cm
- Kokonaiskorkeus: 90 cm
- Paino: 18 kg
- Leveys taitettuna: 33 cm
- Istuinkorkeus: 48 cm
- Istuimen leveys: 41, 43, 45 tai 48 cm
- Istuimen syvyys: 44 cm
- Selkänojan korkeus: 42 cm
- Pyöräkoko: eturenkaat 8 " tuumaa, takarenkaat 24 " tuumaa
- Kantavuuden enimmäiskapasiteetti: 120 kg
- Materiaali: Runko maalattu teräs, pyörät alumiini ja PU (polyuretaani), käsinojat PVC, Istuin/Selkänoja nailon ja Oxford kangas

Pyörätuolin puhdistaminen

Pyörätuolin metalliosia ja runkoa voidaan puhdistaa pyyhkeellä ja muoviharjalla sekä miedoilla pesuaineilla. Pehmusteita voidaan pyyhkiä desinfiointiaineella ja käsinpestä miedossa lämpötilassa, maksimi 40 C.

Takuuaika

Takuuaika on 24 kuukautta ja se liittyy kaikkiin tuote- tai valmistusvirheisiin, joiden voidaan todennettavasti johtua valmistus- tai materiaalivirheistä. Takuu ei koske käytössä kuluvia osia kuten renkaita.