

Rollaattorin osat



- 1 Kahva
- 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko
- 3 Jarru
- 4 Kahvan korkeuden säätövipu
- 5 Takapyörä
- 6 Runko
- 7 Etupyörä
- 8 Kori
- 9 Istuin
- 10 Tarjotin
- 11 Jarruvaijeri
- 12 Kepinpidike

HUOM. Rollaattorin varusteet vaihtelevat malleittain.

KOKOONTAITTAMINEN JA AVAAMINEN

Kokoontaittaminen

Ota mahdolliset lisävarusteet, kuten esim. kori ja tarjotin pois rollaattorista. Taita rollaattori painamalla punaista lukitusvipua sisäänpäin (1) ja vetämällä samanaikaisesti takarungon poikkiputkea (2) ylöspäin.

Huomio:

Älä työnnä sormiasi puristusmekanismiin äläkä putkien väliin. Puristumisvaara.

Avaaminen

Paina takarungon poikkiputkea (2) alaspäin. Taittovivun on naksahdettava kuuluvasti paikoilleen!



Korkeuden säätökahvat

Työnnä kahvan putki rollaattorin runkoon vähintään maksimimerkin (MAX) kohdalle. Kun kahva on sopivalla korkeudella, kiinnitä tanko kääntämällä kiinnitysvipua myötäpäivään. Säädä kumpikin kahva samalle korkeudelle /tasolle.

Säädä kahvat kulkusuuntaan!


Voit säätää kiinnitysvivun asennon vetämällä ja kääntämällä sitä samanaikaisesti.

Jos haluat säätää kahvojen korkeutta uudestaan, vapauta kiinnitysvipu kääntämällä sitä vastapäivään. Kun korkeus on säädetty, kiinnitä vipu uudestaan edellä kuvatulla tavalla.



Jarruttaminen/pysäköiminen

Rollaattoria jarrutetaan nostamalla kumpaakin käsijarrua ylöspäin kohti kahvaa (katso kuva). Jarruta aina hitaasti ja tasaisesti.

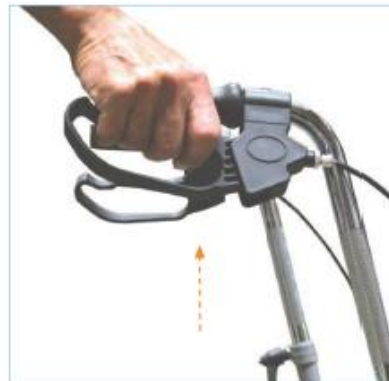


Kun pysäköit rollaattorin, paina jarrut alas niin, että ne napsahtavat jarruasentoon (katso kuva).



Jarrut vapautetaan vetämällä ylöspäin kohti kahvoja, kunnes lukitus aukeaa (kumpikin jarru on keskiasennossa).

Jarrujen teho voi heikentyä renkaiden kuluessa. Siksi jarrut on testattava säännöllisesti.

Turvaohjeet

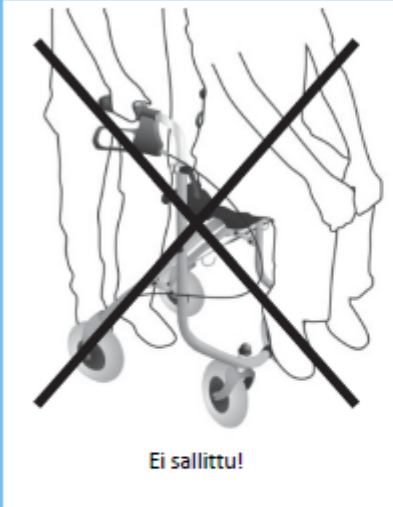 <p>Ei sallittu!</p>	<p>Rollaattori on tarkoitettu ainoastaan kävelyn apuvälineeksi!</p>
	<p>Rollaattoria saa käyttää vain tasaisilla ja tukevilla pinnoilla. <u>Sitä ei saa käyttää istuimena ajoneuvoissa (esim. bussissa tai junassa).</u></p>
	<p>Rollaattorin päällä ei saa seistä eikä sitä saa käyttää pyörätuolina! Sitä ei saa käyttää henkilöiden tai eläinten kuljetukseen!</p>
	<p>Enimmäiskuorma: 130 kg.</p>
	<p>Tarjottimelle saa asettaa pieniä, kevyitä esineitä, jotka eivät ole teräviä tai kuumia. Enimmäiskuorma: 5,0 kg.</p>
<p>Käytä koria vain esineiden kuljetukseen. Älä kuormita tarjotinta liikaa.</p>	

Puhdistus ja kunnossapito

Puhdista rollaattori säännöllisesti kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita. Tarkista kahvojen kiinnitys.
Rollaattorin ruuvit on tarkastettava säännöllisesti ja kiristettävä tarvittaessa.