



L I N C T U S

Suihkutuoli kädensijoilla /ja selkänojalla, kokoontaitettava suihkutuoli, käyttö- ja asennusohje


Käyttötarkoitus

Käytetään suihkussa tai kylvyssä henkilöille, joilla on rajalliset mahdollisuudet seistä ja liikkua.


Ennen ensimmäistä käyttöönottoa

Tarkista, että tuoli on ehjä ja kaikki osat ovat mukana. Asennusalustan tulee olla 53x53cm suuruinen ja painoa kestävä.

Kädensijallisen ja selkänojallisen suihkutuolin asennus

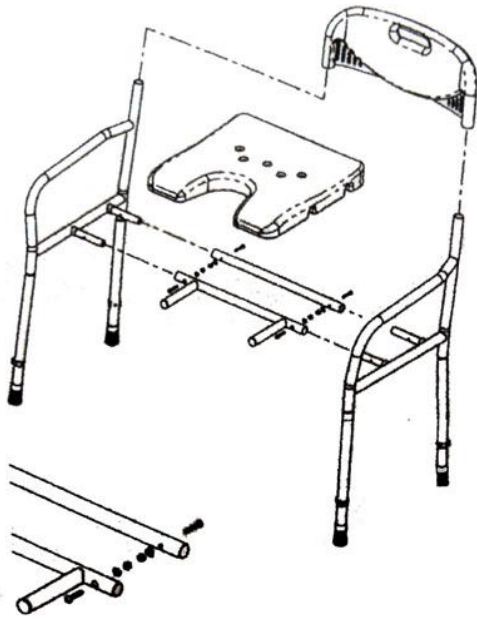

1. Kiinnitä poikkitangot ruuveilla, prikoilla ja muttereilla tuolin sivutankoihin, kuvien mukaisesti.
2. Istuinosan alapuolella on kourut poikkitangoille. Paina istuinosaa paikoilleen kuvan mukaisesti. Painaminen vaatii voimaa. Varmista, että istuin on tukevasti paikoillaan.
3. Mikäli tuolissa on selkänoja, aseta se tuolin sivutankoihin ja paina alaspäin noin 7 cm, kunnes tunnet vastuksen. Älä käytä rasvaa tms. liukastusainetta selkätuen asennuksessa.

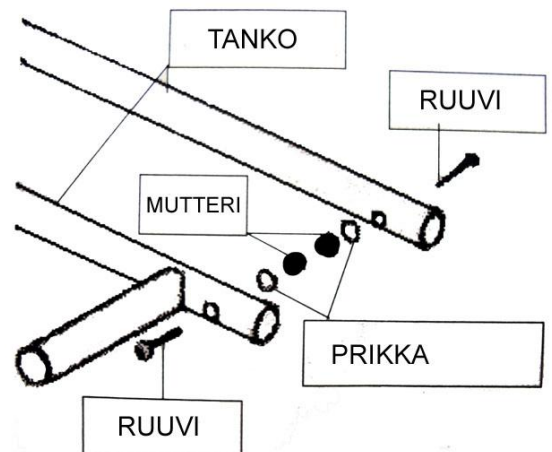

Kokoontaitettavan suihkutuolin asennus


Suihkutuoli käytössä



Suihkutuoli kokoon taitettuna




1. Avaa kokoon taitettu suihkutuoli nostamalla istuinosaa ja levittämällä sivutuet.
2. Paina istuinosan sivutanko sitä vastaavaan sivutangon pidikkeeseen, kuvan mukaisesti.
3. Varmista, että sivutanko on tukevasti kiinni pidikkeessä.
4. Käytön jälkeen pura suihkutuoli nostamalla sivutanko pois pidikkeestä ja taittele tuoli kasaan.

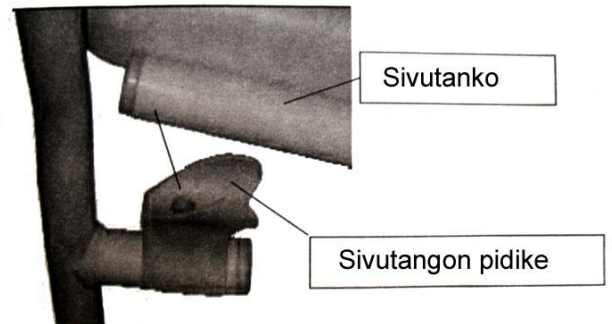

Korkeuden säätö

1. Vedä kiinnityssokka irti.
2. Säädä jalka halutulle korkeudelle. Jalassa on reikiä muutaman sentin välein. Aseta reiät kohdalleen.
3. Aseta sokka takaisin paikoilleen. Paina kunnes kuulet selvän napsahduksen.
4. Varmista että sokka on varmasti kunnolla paikoillaan ennen käyttöönottoa!
5. Toista sama säätö kaikille jaloille.

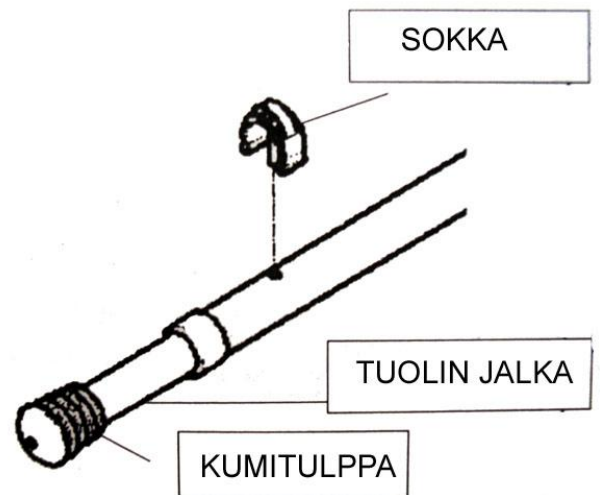

Tuolin käyttö ja huolto

Varmistu aina ennen käyttöä, että tuoli on asennettu ja korkeus säädetty oikein. Istu aina tuolin keskellä, näin vältät horjumisen ja luisumisen pois tuolista.

Puhdista tuoli muovipinnoille soveltuvalla puhdistus- tai desinfioimisaineella. Älä käytä teräviä esineitä tai kovasti hankaavia harjoja puhdistukseen. Ne saattavat vahingoittaa muovi- ja metallipintoja.

Turvallisuusohjeita

- Maksimikuorma tuolille on 120kg.
- Varaa tuolille riittävästi tilaa kylpyhuoneessa.
- Älä käytä tuolia, jos sinulla on vaikeuksia hallita tasapainoasi istuma-asennossa.
- Pyydä tarvittaessa avustajan apua istuutumiseen ja ylösnousemiseen.
- Mikäli tuolin osat menevät huonoon kuntoon, älä käytä tuolia enää.
- Varmista että tuolin neljä jalkaa ovat säädetty samalle korkeudelle ja, että kiinnityssokat ovat varmasti kunnolla kiinni.
- Pyydä tarvittaessa avustajaa varmistamaan, että tuoli on tukeva ja turvallinen.
- Varmista kuukausittain, että kiinnitysruuvit ovat kunnolla kiinni.
- Älä seiso tuolilla.
- Älä anna lasten leikkiä tuolilla.
- Älä nojaa selkänojaan istuutuessasi ja ylösnoustessa. On vaara, että tuoli kallistuu tai kaatuu.
- Tuoli ei sovellu saunaan.

Tekniset tiedot

Suihkutuoli kädensijoilla	Suihkutuoli kädensijoilla ja selkänojalla Kokoontaitettava suihkutuoli
Pituus: 44 cm	Pituus: 50 cm
Leveys: 53 cm	Leveys: 55 cm
Korkeus: 63-71 cm	Korkeus: 85-93 cm
Säätövara: 46-54 cm	Säätövara: 46-54 cm
Istuimen koko: 40x41 cm	Istuimen koko: 40x41 cm
Maksimikuorma: 120 kg	Maksimikuorma: 120 kg
Tuolin paino: 3,0 kg	Tuolin paino: 3,0 kg
Väri: valkoinen	Väri: valkoinen
Käyttöikä: 10 vuotta	Käyttöikä: 10 vuotta

Osaluettelo (suihkutuoli kädensijoilla ja/ selkänojalla)

- 2 sivutankoa ja 2 poikkitankoa
- 1 istuinosa
- 1 selkänoja (vain selkänojallinen malli)
- 4 ruuvia, mutteria ja priikkaa
- 1 asennus- ja käyttöohje

Yhteystiedot

Linctus Oy, Turuntie 4-6, 13130 Hämeenlinna, www.linctus.fi