

Suihkuistuin kääntyvällä istuimella, seinään kiinnitettävä



seinään kiinnitettävät osat

kääntyvä istuinosa



Asennus

- Säädä jalat halutulle istumakorkeudelle.
- Asettele seinään kiinnitettävät osat vähintään 19 cm etäisyydelle toisistaan. Merkitse osien ja reikien kohdat seinään ja varmista, että jalkojen ja istuinosan välinen kulma on 90 astetta.
- Kiinnitä asennustarrat seinään merkkien kohdalle ja poraa seinään reiät. HUOM! Tuolin asentaja vastaa asennuskohdasta ja siitä, että reiät porataan oikein.
- Kiinnitä tuoli seinään propuilla varustetuilla ruuveilla ja peitä mutterien kannat muovitulpilla.
- Varmista, että tuoli ja kiinnitykset ovat tukevia ennen käyttöönottoa.

Tekniset tiedot

- Materiaali muovia ja alumiinia.
- Istuimen koko 40x40 cm.
- Istuin korkeus, 50 – 60 cm.
- Maksimikuorma 130 kg.
- Asennusruuvit mukana.

Yhteystiedot

Linctus Oy, info@linctus.fi , www.linctus.fi